

ISTRUZIONI PER L'USO

CAMICE

CBARRIER+

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I



AVVERTENZE GENERALI

Il camice CBARRIER+ si caratterizza per un'ampia vestibilità e comfort e offre all'operatore una protezione igienica. Non è idoneo per interventi chirurgici o uso strettamente medico

CATARRATTERISTICHE TECNICHE

Camice composto da tessuto non tessuto (100% polipropilene) idrorepellente, antimacchia, batteriostatico e traspirante. Non contiene lattice. Polsini elastici per una buona tenuta.

Può essere sterilizzato dall'utilizzatore prima dell'uso con metodologie validate.

Al contrario di altri modelli il camice CBARRIER+ può essere indossato facilmente anche senza l'aiuto di un collega, grazie alla chiusura in velcro dietro al collo e al laccio da annodare sul fianco.

COME INDOSSARE IL CAMICE

- Estrarre il camice dalla confezione con le mani pulite e asciutte o con guanti puliti (se necessita una sterilizzazione prima dell'uso, questa può essere realizzata dal cliente mediante procedure validate)
- Stendere il camice su una superficie pulita
- Indossare le braccia dentro le maniche
- Fare scivolare mani e avambracci dentro le maniche, tenendo le braccia all'altezza delle spalle e distanti dal corpo
- Infilare le braccia completamente facendo uscire le mani dai polsini
- Chiudere il camice con la striscia di velcro dietro il collo
- Regolare il camice tirando i lacci e annodandoli su un fianco

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare nel caso di evidenti danni o difetti (buchi, strappi ecc.).

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.
Può essere lavato a bassa temperatura (30° C) con detersivo e ciclo di lavaggio per capi delicati. Non centrifugare. Non stirare.
Può essere sterilizzato in autoclave.

SMALTIMENTO

Se contaminato, smaltire dopo l'uso come un rifiuto biologico infettivo.