

ISTRUZIONI PER L'USO

MASCHERINA FACCIALE MONOUSO AD USO MEDICO MOD. PGUARD5+

CONFORME UNI EN 14683:2019 – TIPO I

Le mascherine facciali ad uso medico PGUARD5+ sono dispositivi che coprono la bocca ed il naso fornendo una barriera per ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi tra il personale e il paziente.

Sono inoltre in grado di ridurre la possibilità di contagio per via respiratoria, se indossate da una persona malata.

Sono conformi allo standard UNI EN 14683:2019 e classificate di Tipo I.

Le maschere facciali ad uso medico di Tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le mascherine PGUARD5+ sono MONOUSO. Non contengono lattice. Non sono sterili.

Sono realizzate in tessuto non tessuto 100 % polipropilene in 4 strati idrorepellente e traspirante.

COME INDOSSARE LA MASCHERINA

- Maneggiare la mascherina con guanti o con mani perfettamente pulite
- Inserire le dita fra gli elastici auricolari, tenendo verso l'alto il bordo comprendente il "ferretto stringinaso"
- Sistemare la mascherina sul viso accertandosi di coprire naso e bocca e la punta del mento
- Posizionare gli elastici attorno alle orecchie
- Tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per distendere completamente le pieghe
- Modellare il ferretto stringinaso in modo da garantire una buona aderenza al viso e un migliore confort
- Durante l'uso non toccarla con le mani o con materiale potenzialmente contaminato
- Sostituire la mascherina se contaminata o quando diventa umida con la respirazione
- Smaltire la mascherina usata secondo le norme vigenti (come rifiuto sanitario a rischio biologico se è contaminata)

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare nel caso di evidenti danni o difetti (buchi, strappi, elastici staccati ecc.).

Non usare in sostituzione di un respiratore a filtro in presenza di contaminanti chimici (es. polveri, silice ecc.)

Non è previsto l'utilizzo in ambiente "operatorio" o in altri ambienti sanitari ad alto rischio come reparti di malattie infettive.